

*Banded Gastric Bypass*

# So profitieren Sie langfristig von Ihrem Magenbypass!

Die Ring-verstärkte Magenbypass Operation



**Mini**MIZER  
RING

 **BARIATRIC  
SOLUTIONS**  
INTERNATIONAL

Für Sie kommt ein Eingriff zur Gewichtsreduktion infrage. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das Ihr Leben verändern wird, also wollen Sie auch die richtige Entscheidung treffen. Zur Verkleinerung des Magens gibt es verschiedene Verfahren. Ihnen allen ist gemein, dass sie die Menge an Nahrung begrenzen, die konsumiert werden kann. Ein wichtiger Faktor dabei ist, wie diese Begrenzung erfolgt. Sie besprechen gemeinsam mit Ihrem Chirurgen, welches Verfahren sich am besten für Sie eignet.

### Auswirkungen eines Magenbypasses

Ein Magenbypass ist einer der am häufigsten durchgeführten Eingriffe. Bei einer Magenbypass-Operation wird der Magen verkleinert und ein Teil des Dünndarms umgangen. Der Magenbypass hat einen dreifachen Effekt auf Ihren Gewichtsverlust:



- 1 Der MiniMIZER RING warnt Sie, wenn Sie zu viel oder zu schnell essen
- 2 Durch den verkürzten Dünndarm nehmen Sie weniger Nährstoffe auf.
- 3 Hormonelle Veränderungen reduzieren das Hungergefühl.

### Diese Faktoren stellen sicher, dass Sie an Gewicht verlieren

Beachten Sie, dass ein Verfahren zur Gewichtsreduktion nur ein Hilfsmittel zur Gewichtsabnahme ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass im ersten Jahr nach dem Eingriff etwa 80 % des Gewichtsverlusts einer Person auf den Magenbypass und 20 % auf ihre Bereitschaft zu einer Verhaltensänderung zurückzuführen sind. Dieses Verhältnis kehrt sich jedoch nach Ablauf eines Jahres um, daher ist eine Änderung des Verhaltens sehr wichtig.



Schnellerer Gewichtsverlust!

Geringe langzeitige Gewichtszunahme!

### Einer langfristigen Gewichtszunahme entgegenwirken

Leider kommt es bei manchen Patienten längerfristig zu einer Gewichtszunahme, wobei die Ursachen vielfältig sind. Patienten, die nach ihrer Magenbypass-Operation wieder zunehmen, haben unter anderem auch ein reduziertes Sättigungsgefühl. Das Sättigungsgefühl wird durch die neue Verbindung (Anastomose) zwischen dem Magen und dem Dünndarm mitbestimmt. Wenn sich diese Verbindung mit der Zeit ausdehnt, fühlen die Patienten sich weniger satt und essen mehr.

Das Einsetzen eines sogenannten MiniMIZER RINGs während der Magenbypass-Operation kann eine ungewollte langfristige Gewichtszunahme verhindern.

Der Ring hilft dabei, den Durchmesser der Anastomose und das Sättigungsgefühl zu erhalten. Diese Variante des Magenbypasses nennt man auch „Ring-verstärkten Magenbypass“ (Banded Gastric Bypass).



## Was ist der MiniMIZER RING?

Der MiniMIZER RING ist ein zertifiziertes Implantat. Er besteht aus medizinischem Silikon, was verhindert, dass es zu einer Abwehrreaktion des Körpers gegen den Magenring kommt.

Nach einer Magenbypass-Operation legt der Chirurg den MiniMIZER RING um den unteren Teil des verkleinerten Magens. Der Ring wird fixiert, sodass er nicht verrutschen kann.

## Wie wirkt sich der MiniMIZER RING aus?

Da der MiniMIZER RING um den verkleinerten Magen gelegt wird, verzögert sich der Durchgang der Nahrung zusätzlich. Dadurch fühlen Sie sich noch schneller satt und hören früher auf zu essen. So trägt der Ring zu der erwünschten Veränderung Ihrer Essgewohnheiten bei und erleichtert es Ihnen, weiterhin ein Sättigungsgefühl zu erfahren.

## Wie sind die Ergebnisse? Bessere Gewichtsreduktion:

Im Durchschnitt verlieren Patienten nach einer Magenbypass-Operation 70% ihres Übergewichts. Untersuchungen zeigen, dass der Verlust des Übergewichts bei Patienten nach einer Ring-verstärkten Magenbypass-Operation (mit dem MiniMIZER RING um ihren verkleinerten Magen) ein Jahr nach der Operation im Durchschnitt um 14 % höher und fünf Jahre nach der Operation im Durchschnitt um 24 % höher war als bei Patienten mit einem Magenbypass ohne Ring-Verstärkung.



**Mini**MIZER  
**RING**

### Einer erneuten Gewichtszunahme entgegenwirken

Mehr als fünf Jahre nach einem Eingriff nehmen etwa die Hälfte aller Patienten mit einem Magenbypass wieder zu. Diese Gewichtszunahme passiert ganz allmählich und fällt manchmal so hoch aus, dass ein zweiter Eingriff erforderlich ist.

Nach einem Ring-verstärkten Magenbypass bleibt das Gewicht langfristig deutlich stabiler.


### Welche möglichen Nebenwirkungen hat ein MiniMIZER RING?

Eine mögliche Nebenwirkung des MiniMIZER RINGS ist Erbrechen. Der Ring verlangsamt den Durchgang Ihrer Nahrung, so dass es sehr wichtig ist, dass Sie Ihr Essverhalten und Ihre Ernährung entsprechend anpassen. Achten Sie darauf, kleine Bissen zu sich zu nehmen, gut zu kauen und zwischen den Bissen eine Pause einzulegen. Dadurch verbessert sich der Nahrungsfluss und das Erbrechen wird verhindert bzw. reduziert.

Hält das Erbrechen an, obwohl Sie Ihr Essverhalten und Ihre Ernährung angepasst haben? Dann muss der MiniMIZER RING möglicherweise gelockert oder sogar entfernt werden.

Eine äußerst seltene Komplikation ist eine sogenannte Erosion/Migration. Dabei wandert der MiniMIZER RING aufgrund von Druck durch die Magenwand. In einem solchen Fall muss der Ring entfernt werden.



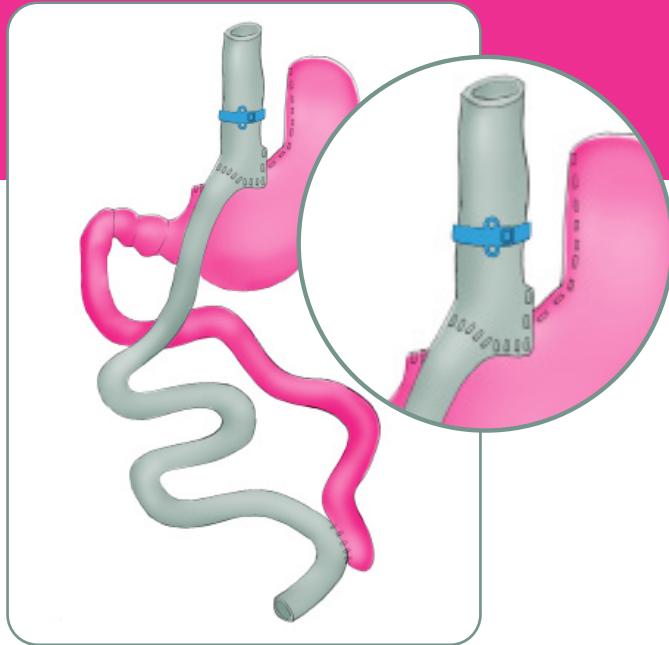

Die Magenbypass-Operation mit einem MiniMIZER RING trägt dazu bei, dass Sie mehr Gewicht verlieren und verhindert eine langfristige Gewichtszunahme. Besprechen Sie die Vorteile des MiniMIZER RINGS mit Ihrem Chirurgen, um zu erfahren, ob der Ring das Richtige für Sie ist!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite



CE 0483

*Zugrundeliegende Daten auf Anfrage erhältlich*

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieser Broschüre ist kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Lassen Sie sich bei Fragen zu einer Erkrankung immer von Ihrem Arzt oder einem anderen qualifizierten Gesundheits-Dienstleister beraten. Ignorieren Sie niemals professionellen medizinischen Rat auf Grund des Inhaltes, den Sie in dieser Broschüre gelesen haben. Bariatric Solutions International GmbH - Kaltenbacherstrasse 24 - CH 8260 Stein am Rhein